	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>HOME PUMP 100 ML. 0.5 ML/HR (7 DÍAS).</b>	

<b>Individualización del Producto</b>	
<b>Descripción</b>	El sistema HOME PUMP es una bomba de infusión desechable elastomérica que se utiliza para la infusión continua de medicamentos. Funciona sin gravedad ni suministro eléctrico, lo que lo hace completamente portátil, compacta y liviana.
<b>Código</b>	C100005.
<b>Marca</b>	AVANOS.
<b>Procedencia</b>	E.E.U.U




<b>Descripción del Producto</b>	
<b>Indicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuado para una gran variedad de medicamentos. Su uso dependerá del tratamiento del paciente.</li> <li>• Se utiliza para suministrar diferentes tratamientos, como quimioterapia, epidural, dolor paliativo y terapias de infusión de varios días.</li> <li>• Vías de administración: Intravenosa, intraarterial, epidural y subcutánea.</li> </ul>
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No presenta contenedor rígido en su exterior y su contenedor de PVC se colapsa una vez administrada la infusión, lo que otorga una mayor comodidad al paciente.</li> <li>• Esta constituido por una membrana elastomérica patentada que brinda rendimiento y confiabilidad que cuenta con tres capas. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Capa interna de elastómero sintético: Kraton.</li> <li>○ Capa media aislada de látex: Capa SIN CONTACTO CON EL PACIENTE NI CON EL MEDICAMENTO).</li> <li>○ Capa externa de PVC.</li> </ul> </li> <li>• Completa compatibilidad de medicamentos y datos de estabilidad.</li> <li>• Tamaño pequeño que permite su fácil almacenamiento y comodidad del paciente.</li> <li>• Es colapsable, siendo fácil de desechar.</li> <li>• Presenta un filtro de partículas 1.2 micras y ventanas de aire en el filtro de 0.22 micrones para eliminación efectiva de posible aire en la línea de infusión.</li> <li>• Presenta pinza o clamp para pinzamiento de línea de infusión.</li> </ul>

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>HOME PUMP 100 ML. 0.5 ML/HR (7 DÍAS).</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenta un restrictor de flujo de calibración térmica en la línea de infusión para garantizar exactitud en las tasas de infusión.</li> <li>• Calibración a temperatura de la piel 31° C.</li> <li>• Producto se encuentra disponible junto a un bolso.</li> <li>• Volumen de Purgado: 10 ml de solución salina normal.</li> <li>• Volumen de llenado indicado en la etiqueta: 100 ml.</li> <li>• Flujo indicado en la etiqueta: 0.5 ml/hr.</li> <li>• Volumen mínimo: 71 ml.</li> <li>• Volumen máximo: 125 ml.</li> <li>• Volumen retenido (ml): <math>\leq 4</math>.</li> </ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 13485:2003.</li> <li>• FDA.</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
<b>Empaque</b>	El producto viene embalado en caja de cartón con 24 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote.
<b>Esterilización</b>	Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)