	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	POWERGLIDE PRO 20 G x 10 CM	

Individualización del Producto	
Descripción	Catéter Midline PowerGlide Pro de 20 G x 10 cm de extensión para utilización de corto plazo (hasta 30 días).
Código	6F120100
Marca	BD-BARD
Procedencia	E.E.U.U




Descripción del Producto	
Indicaciones	<p>El catéter PowerGlide Pro de extensión Midline está indicado para el acceso periférico a corto plazo (hasta 30 días), al sistema venoso con el fin de toma de muestra de sangre, infusión de soluciones por vía endovenosa.</p> <p>Es compatible con bombas inyectoras automáticas resistiendo hasta 325 PSI de presión.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Catéter de un Lumen para instalación por técnica de Seldinger abreviado. • Material del catéter: Poliuretano radiopaco de última generación. • Dimensiones del catéter: <ul style="list-style-type: none"> ○ 20 G 1,15 mm. ○ 10 cm longitud total. • Punta reforzada diseñada para mejorar y mantener un índice de flujo de aspiración constante sin colapsar el catéter. • Alas de deslizamiento del catéter contienen un mecanismo de control de la sangre que impide el flujo de sangre hasta que el médico esté listo para conectar un dispositivo accesorio. • Aguja con muescas permite la confirmación visual • Aguja de introducción de 22G (0,7 mm) con sistema de bioseguridad de tipo pasivo. • Guía de nitinol incorporada en sistema de instalación con diámetro de 0,014 pulgadas (0,36 mm), con punta recta. • Velocidad de flujo de la inyección: 5 ml/seg. • Presión máxima promedio: 325 psi. • Guía Nitinol integrada está diseñada para ayudar con los pinchazos difíciles y permite ángulos pronunciados de inserción.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	POWERGLIDE PRO 20 G x 10 CM	

	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y volumen del cebado (ml): El catéter debe ser purgado energícamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal cada 12 horas o después de cada uso. • Volumen de Cebado: 0,15 ml.
Biocompatibilidad	Todos los componentes de PowerGlide Pro son biocompatibles y libres de látex.
Otros Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de fijación sin puntos Statlock IV • Preparador Cutáneo.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485:2016. • FDA.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	El producto viene embalado en la caja de cartón con 20 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos para la ficha paciente
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl