

MARCADOR SENOMARK ULTRA ENCOR

CÓDIGO: SMEC10C

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Marcador de tejido mamario estéril SENOMARK ULTRA compatible con la aguja (sonda) de biopsia ENCOR de 10G, utilizado para referenciar el lugar de la mama donde se ha realizado la biopsia.

Características

- Visibilidad en tres modalidades de imagen: Ultrasonido, RM y mamografía.
- Visibilidad permanente en ultrasonido.
- Sistema de colocación con extremo desplegable rígido.
- Consta de un aplicador desechable que contiene 3 almohadillas hidrosópicas de microfibra de ácido poliglicólico (PGA) reabsorbibles e hidrofílico en aproximadamente 12 semanas.
- La almohadilla central contiene una estructura de alambre de titanio o Biodur 108 con un polímero de alcohol polivinílico (PVA) entretejido, para un realce ecográfico permanente. El polímero de PVA no se reabsorbe. El extremo de empuje proximal (bolita) de la almohadilla es de polietilenglicol, que presenta la característica hidrofílica de polietilenglicol (PEG) y la estructura de "O" del alambre, actúa como marcador radiológico a largo plazo en la zona de la biopsia.
- El aplicador, similar a una jeringuilla, se une a la sonda de biopsia ENCOR desplegando las almohadillas mediante su aplicador, en la cavidad de la biopsia.
- Estructura de alambre de titanio con PVA



Composición

- Botón del émbolo: Policarbonato.
- Resorte del émbolo: Acero Inoxidable.
- Tubería del émbolo: Acero Inoxidable 304.
- Mango aplicador: Policarbonato.
- Indicador de alineación: Policarbonato.
- Punta de la guía: Acrilonitrilo - Butadien-Estireno.
- Tubo aplicador: Polieter boque amida.
- Punta de aplicador: Polieter boque amida.

Almacenamiento

- El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco y rigurosamente controlado a temperatura inferior a 25°C.
- Dispositivo cuenta con un indicador de temperatura.
- No usar si el indicador de temperatura del envase del producto tiene color negro.

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote e indicador de temperatura.