

# CATÉTER POWER PICC IR 5 FR. DOBLE LUMEN

## CÓDIGO: 3275335

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Catéter venoso central insertado periféricamente (PICC), indicado para el acceso periférico a corto o largo plazo al sistema venoso central, para la administración parenteral de medicamentos, fluidos y soluciones nutritivas, para la toma de muestra de sangre venosa y para realizar tratamientos intravenosos.


Permite el uso de medios de contraste (Tecnología POWER) a través de bombas de inyección (5ml/sg), y monitorización de la presión venosa central.

### Características

- Catéter doble lumen.
- Material del catéter: Poliuretano radiopaco de última generación.
- Dimensiones del catéter:
  - 5 FR (18 G por cada lumen diámetro interno).
  - 1,8 mm diámetro externo.
  - 55 cm longitud total.
- Volumen de Cebado: 0.57 ml.
- Espacio muerto: 0.57 ml para ambos lúmenes.
- Velocidad de flujo de la inyección de poder: 5 ml/seg.
- Velocidad de flujo por gravedad (ml/hr): 578 ml/hr en ambos lúmenes.
- Presión máxima promedio: 300 psi.
- Tamaño del microintrodutor: 5 Fr x 10 cm.
- Mantenimiento: El catéter debe ser purgado enérgicamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal cada 12 horas o después de cada uso con técnica de push-stop con presión positiva.

### Componentes

- Catéter PICC KIT IR 5 FR doble lumen.
- Sistema de fijación sin puntos Statlock PICC Plus.
- Microintrodutor MicroEZ de 5 Fr. x 10 cm con dilatador venoso.
- Jeringa de 12 ml.
- 2 tapas para cada lumen.
- Guía de nitinol con punta recta atraumática de 0.46 mm x 135 cm.
- Bisturí con seguridad.
- Aguja introductora de 21 G.
- Cinta de métrica.

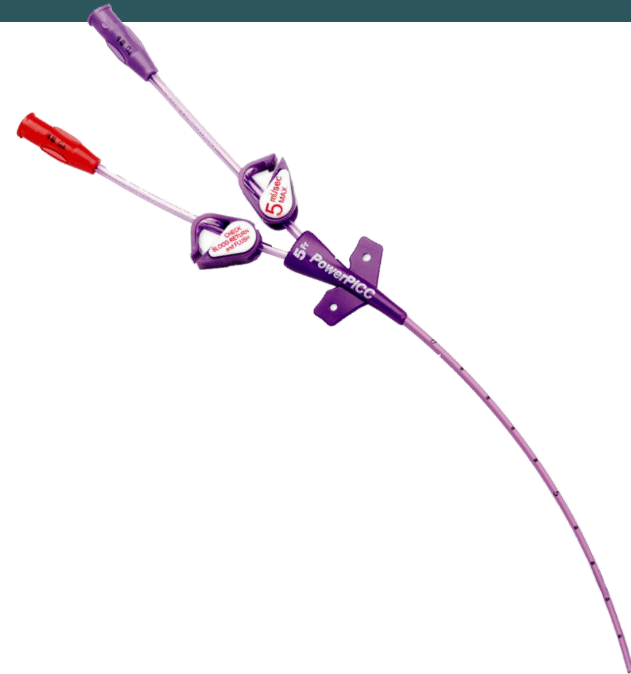

### Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP.

### Certificaciones

- ISO 13485:2016
- FDA.

### Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

### Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

### Empaque

El producto viene embalado en caja de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.